


REF	
33 709	35 - 45

Ortýza • ke stabilizaci hlezenního kloubu

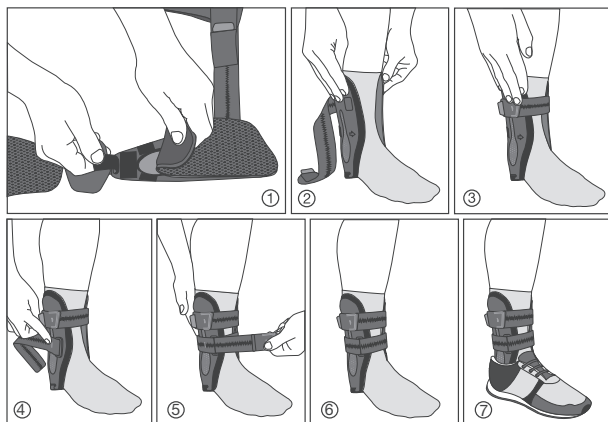

Popis produktu a charakteristika:

Cellacare® Malleo Akut Classic je ortýza k akutnímu ošetření hlezenního kloubu. Dvě tvrdé skořepiny, které jsou navzájem spojeny patním třmenem, a dva kruhové popruhy na bérce přispívají ke stabilizaci hlezenního kloubu. Ortýzu lze nosit na levém nebo pravém hlezenním kloubu.

Složení produktu:

polypropylen, termoplastický elastomer, polyuretan, polyester, polyamid, acetalová pryskyřice, bavlna

Účel použití:

Ortýza ke stabilizaci hlezenního kloubu

Indikace:

- poranění vazů v horní části hlezenního kloubu (stupeň 1–2)
- chronická nestabilita vazů
- aktivovaná artróza, artritida
- perimaleolární otok, kloubní výpotek, intraartikulární stav podráždění

Kontraindikace:

- známá alergie a/nebo precitlivělost na složku produktu

Použití:

1. Úprava Cellacare® Malleo Akut Classic:

Tvar patního třmenu ukazuje na zaoblení paty. Šipky na skořepinách směřují k přední straně produktu. Scořepiny upravte podle kotníků (obr. 2).

2. Úprava horního popruhu se suchým zipem:

Zasuňte horní popruh se suchým zipem skrz určenou štěrbinu. Utáhněte upevňovací popruh se suchým zipem přes holeň, přitlačte ho na háčky na skořepině a zapněte (obr. 3). Dbejte na vystředění ortýzy, tj. aby vzdálenost mezi skořepinami na přední a zadní straně hlezenního kloubu byla stejná.

3. Úprava odnímatelného spodního popruhu se suchým zipem:

Odnímatelný spodní popruh se suchým zipem se zelenou značkou umístěte na zelenou část vnější skořepiny tak, aby přezka směřovala dopředu ve směru šipky (obr. 4). Připevněte popruh se suchým zipem k háčkům skořepiny a vzadu ho při tom vedte kolem bérce. Úprava se provádí zasunutím popruhu se suchým zipem skrz přezku a utažením v opačném směru (obr. 5).

4. Kontrola správného usazení ortýzy:

V případě potřeby upravte popruhy se suchým zipem a patní třmen. Ortýza musí přiléhat přesně na kotníky. Je třeba se bezpodmínečně vyhnout zaškrcení (obr. 6). Doporučujeme nosit šněrovací obuv (obr. 7).



Druckstandsskizze / Printing sketch

Artikel-Nr. / Article No: REF 33 709

Artikel / Product: Cellacare Malleo Akut Classic

Beutel / Volleinschlag / Banderole / Pouch / Bag / Cutting / Wrapping / Primary package

Beutelgröße / Size of bag:

Länge / Lenght:		mm	Breite / Widht:		mm
Seitenfalte / Fold (side):		mm	Bodenfalte / Fold (bottom):		mm
Aufreißband vom rechten Packungsrand/ Tear-off strip from right end of package:					mm
Weißfläche / White background			X		mm

Farbe des Behandlungsindikators nach dem Sterilisationsprozess / Color of the sterilization indicator after sterilizationprocess:

Dunkelbraun / Dark brown		
--------------------------	--	--

Siegelbeschichtung: Beutelvorderseite (innen)
Seal coating: front of bag (inside)

Blau / Blue Pantone 290 U		
---------------------------	--	--

Faltschachtel / Secondary package (cardboard box)

X Etikett/Label

Länge / Lenght:	105	mm	Breite / Widht:	165	mm
Höhe / Height:		mm			mm

Faserlaufrichtung/fibre direction:

☐	quer zur Klebekante / cross grain	☐	
☐	parallel zur Klebekante/ parallel grain	☐	frei/free

Wellenlaufrichtung/direction of the flute:

☐	quer zur Klebekante / cross grain	☐	
☐	parallel zur Klebekante/ parallel grain	☐	frei/free

Druck / Print:

X	Schwarz/Black	☐	CMYK (Proof beachten!)	☐	Matt-Lack
☐	Grün / Green Pantone 355 C	☐	Braun / Brown Pantone 7530 C	☐	Glanz-Lack im Bereich der Prägung
☐	Grau / Grey Pantone 432 C	☐	Lack / Lacquer	☐	Schwarz / Black

Codierung / Coding: innerhalb des Codiefeldes / inside the coding space

Codierfarbe / Code colour Schwarz / Black

Schriftgröße / Type size 2 - 5 mm

Geforderte Codierteilvariante / Type of coding:

☐	LOT	☐	UDI
☐	 YYYY-MM-DD	☐	EAN 13
☐	 YYYY-MM-DD	☐	GS1 128
☐	CE	☐	GS1 Datamatrix
☐	REF	☐	

Die Druckstandsskizzen sind nicht farbverbindlich. Für die Farbführung und Farbmischungen ist der Pantone Farbfächer verbindlich. Abweichende Ergebnisse bedürfen vor Auflagendruck der Abstimmung und Freigabe durch den Auftraggeber.
This Printing-Sketch is not color binding. The Pantone color fan is binding for color guidance and color mixtures. Deviating results require the orderer's approval and release prior to printing.

Änderungsgrund / Reason for change:	Datum / Date:
Neusatz	18.12.2020