
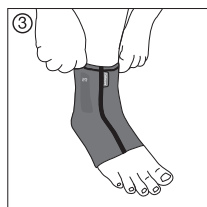
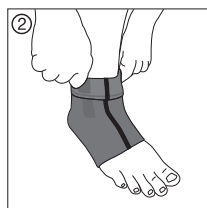


REF	Velikost	
		
107 001	1	18 - 21 cm
107 002	2	21 - 24 cm
107 003	3	24 - 27 cm
107 004	4	27 - 30 cm

Bandáž • ke kompresi a opoře hlezenního kloubu

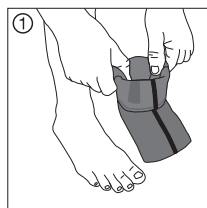

Popis produktu a charakteristika:

Cellacare® Malleo Classic je pletená bandáž s kompresním účinkem, která může zlepšit propriocepci. Silikonové peloty na obou stranách mají masážní účinek. Bandáž lze nosit na pravém nebo levém hlezenním kloubu.

Složení produktu:

bavlna, elastan, elastodien (latex z přírodního kaučuku), polyamid, polyester, polyuretan, silikon

Účel použití:

Bandáž ke kompresi a opoře hlezenního kloubu.

Indikace:

- akutní a chronické bolesti v hlezenním kloubu
- poranění vazů v horní části hlezenního kloubu (stupeň 1)
- mírná chronická nestabilita vazů
- mírná lokální hypermobilita
- začínající artróza, aktivovaná artróza, artritida
- perimaleolární otok, kloubní výpotek, intraartikulární stav podráždění

Kontraindikace:

- známá alergie a/nebo přecitlivělost na složku produktu

Pokyny k použití:

Použití:

1. Horní část Cellacare® Malleo Classic ohrňte až k silikonové vložce směrem ven (obr. 1).
2. Cellacare® Malleo Classic uchopte uprostřed silikonových vložek a Cellacare® Malleo Classic přetáhněte přes nohu tak, aby patní část pevně seděla (obr. 2).
3. Horní část Cellacare® Malleo Classic opět vraťte do původní polohy a v případě potřeby ji vytáhněte nahoru (obr. 3). Dbejte, aby silikonové vložky pevně přiléhaly na obě strany hlezenního kloubu.

Doporučení k péči:

Bandáž perte při 30 °C (šetrné praní v pračce) s podobnými barvami. Nepoužívejte bělicí prostředky. Cellacare® Malleo Classic sušte na vzduchu mimo zdroje tepla; nesušte v sušičce. Nežehlete a nečistěte chemicky. Je-li to možné, používejte k praní sítku.



Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com



Zdravotnický
prostředek



4041989

Druckstandsskizze / Printing sketch

Artikel-Nr. /
Article No: REF 107 001 - 004

Artikel /
Product: Cellacare Malleo Classic

Beutel / Volleinschlag / Banderole / Pouch / Bag / Cutting / Wrapping / Primary package

Beutelgröße / Size of bag:

Länge / Lenght:		mm	Breite / Widht:		mm
Seitenfalte / Fold (side):		mm	Bodenfalte / Fold (bottom):		mm
Aufreißband vom rechten Packungsrand/ Tear-off strip from right end of package:					mm
Weißfläche / White background			X		mm

Farbe des Behandlungsindikators nach dem Sterilisationsprozess /
Color of the sterilization indicator after sterilizationprocess:

Dunkelbraun / Dark brown		
--------------------------	--	--

Siegelbeschichtung: Beutelvorderseite (innen)
Seal coating: front of bag (inside)

Blau / Blue Pantone 290 U		
---------------------------	--	--

Faltschachtel / Secondary package (cardboard box)

X Etikett/Label

Länge / Lenght:	105	mm	Breite / Widht:	165	mm
Höhe / Height:		mm			mm

Faserlaufrichtung/fibre direction:

☐	quer zur Klebekante / cross grain	☐	
☐	parallel zur Klebekante/ parallel grain	☐	frei/free

Wellenlaufrichtung/direction of the flute:

☐	quer zur Klebekante / cross grain	☐	
☐	parallel zur Klebekante/ parallel grain	☐	frei/free

Druck / Print:

X	Schwarz/Black	☐	CMYK (Proof beachten!)	☐	Matt-Lack
☐	Grün / Green Pantone 355 C	☐	Braun / Brown Pantone 7530 C	☐	Glanz-Lack im Bereich der Prägung
☐	Grau / Grey Pantone 432 C	☐	Lack / Lacquer	☐	Schwarz / Black

Codierung / Coding: innerhalb des Codiefeldes /
inside the coding space

Codierfarbe / Code colour Schwarz / Black

Schriftgröße / Type size 2 - 5 mm

Geforderte Codierteilvariante / Type of coding:

☐	LOT	☐	UDI
☐	 YYYY-MM-DD	☐	EAN 13
☐	 YYYY-MM-DD	☐	GS1 128
☐	CE	☐	GS1 Datamatrix
☐	REF	☐	

Die Druckstandsskizzen sind nicht farbeverbindlich. Für die Farbführung und Farbmischungen ist der Pantone Farbfächer verbindlich. Abweichende Ergebnisse bedürfen vor Auflagendruck der Abstimmung und Freigabe durch den Auftraggeber.
This Printing-Sketch is not color binding. The Pantone color fan is binding for color guidance and color mixtures. Deviating results require the orderer's approval and release prior to printing.

Änderungsgrund / Reason for change:	Datum / Date:
Neusatz	18.12.2020