
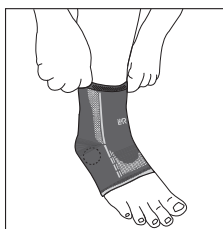


REF	Velikost	
33 761	1	17 - 19 cm
33 762	2	19 - 21 cm
33 763	3	21 - 23 cm
33 764	4	23 - 26 cm
33 765	5	26 - 29 cm
33 766	6	29 - 32 cm

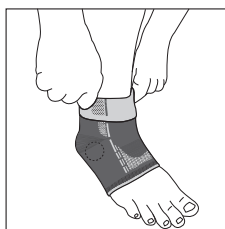

Aktivní bandáž • ke kompresi a opoře hlezenního kloubu

Aktivní bandáž k okamžitému použití na hlezenní kloub se silikonovými anatomickými vložkami pro kompresi a oporu hlezenního kloubu.

Princip účinku:

Aktivní bandáž s kompresním účinkem, která může zlepšit propriocepci.

Složení:

elastan, polyamid, polyester, bavlna, silikon, polyuretan

Indikace:

- poranění vazů v horní části hlezenního kloubu (stupeň 1)
- mírná chronická nestabilita vazů
- mírná lokální, celková hypermobilita
- artróza (také aktivovaná), artritida
- perimaleolární otok, kloubní výpatek, intraartikulární stav podráždění

Kontraindikace:

- v případě kožních onemocnění a/nebo zranění v oblasti použití (poraněná nebo poškozená kůže)

V následujících případech se před přiložením/nošením tohoto produktu poraďte se svým lékařem:

- oběhové a/nebo smyslové poruchy (např. při cukrovce),
- arteriální okluzivní onemocnění,
- porucha odtoku lymfy,
- flebitida a žilní trombóza,
- alergické reakce na jednu nebo více složek

Pokyny k přiložení:

1. Horní část Cellacare® Malleo Comfort ohněte až k silikonové vložce směrem ven (obr. 1).
2. Cellacare® Malleo Comfort uchopte uprostřed silikonových vložek a Cellacare® Malleo Comfort přetáhněte přes nohu tak, aby patní část pevně seděla (obr. 2).
3. Horní část Cellacare® Malleo Comfort opět vraťte do původní polohy a v případě potřeby ji vytáhněte nahoru (obr. 3). Dbejte, aby silikonové vložky pevně přiléhaly na obě strany hlezenního kloubu.



REF 33 761 - 33 766

Cellacare Malleo Comfort

Beutelgröße / Size of bag:

Länge / Length:		mm	Breite / Width:		mm
Seitenfalte / Fold (side):		mm	Bodenfalte / Fold (bottom):		mm
Aufreißband vom rechten Packungsrand/ Tear-off strip from right end of package:					mm
	Weißfläche / White background			X	mm

Dunkelbraun / Dark brown

Blau / Blue Pantone 290 U

Faltschachtel / Secondary package (cardboard box)

X	Etikett/Label
----------	----------------------

Länge / Length:	135	mm	Breite / Width:	215	mm
Höhe / Height:		mm			mm

Faserlaufrichtung/fibre direction:

	quer zur Klebekante / cross grain		
	parallel zur Klebekante/ parallel grain		frei/free

Wellenlaufrichtung/direction of the flute:

	quer zur Klebekante / cross grain		
	parallel zur Klebekante/ parallel grain		frei/free

Druck / Print:

☒	Schwarz/Black	☐	CMYK (Proof beachten!)	☐	Matt-Lack
☐	Grün / Green Pantone 355 C	☐	Braun / Brown Pantone 7530 C	☐	Glanz-Lack im Bereich der Prägung
☐	Grau / Grey Pantone 432 C	☐	Lack / Lacquer	☐	Schwarz / Black

Codierung / Coding:	innerhalb des Codierfeldes / inside the coding space
---------------------	---

Codierfarbe / Code colour Schwarz / Black

Schriftgröße / Type size 2 - 5 mm

Geforderte Codiervariante / Type of coding:

	LOT		UDI
		YYYY-MM-DD	EAN 13
		YYYY-MM-DD	GS1 128
			GS1 Datamatrix
	REF		

Die Druckstandsskizzen sind nicht farbverbindlich. Für die Farbführung und Farbmischungen ist der Pantone Farbfächer verbindlich. Abweichende Ergebnisse bedürfen vor Auflagendruck der Abstimmung und Freigabe durch den Auftraggeber.
This Printing-Sketch is not color binding. The Pantone color fan is binding for color guidance and color mixtures. Deviating results require the orderer's approval and release prior to printing.

Änderungsgrund / Reason for change:

Datum / Date:

Neusatz

06.10.2020



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Verpackungsentwicklung · Postfach 23 43 · 56513 Neuwied · Deutschland
Telefon: 0 26 34/99-0 · Telefax: 0 26 34/99-68 95
www.Lohmann-Rauscher.com