

VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉRA, 50 g

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉROVÁ MAST - POPIS

Mast na obnovu a ochranu pokožky s kaštanovým medem, včelím voskem a jojobovým olejem. Mast obsahuje složky 100% přírodního původu: 40 % kaštanového medu, 16 % včelího vosku a 44 % jojobového oleje.

JAK VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉROVÁ MAST FUNGUJE?

Mast vytváří nepříznivé prostředí pro růst mikroorganismů, podporuje obnovu pokožky, reguluje její vlhkost, zjemňuje ji a chrání.

Med s vysokým obsahem cukru (až 80 %) zvyšuje vlhkost pokožky díky osmotickému působení a podporuje krevní oběh, což vede k rychlejší obnově pokožky.

Včelí vosk a jojobový olej vytvářejí na pokožce ochranný film, který udržuje její vlhkost. Zjemňují pokožku, chrání ji před vysoušením a vnějšími vlivy.

KDY POUŽÍVAT VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉROVOU MAST - INDIKACE?

Mast je určena k obnově a ochraně tenké a podrážděné kůže, po hojení ran a k ochraně kůže v okolí rány.

JAK POUŽÍVAT VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉROVOU MAST?

Několikrát denně naneste tenkou vrstvu masti a vetřete ji do pokožky.

Přípravek používejte pouze na neporušenou pokožku, nikoli na otevřené rány.

Výrobek je určen pouze pro vnější použití.

KDY NEPOUŽÍVAT VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉROVOU MAST - KONTRAINDIKACE?

Přípravek nepoužívejte v případě známé alergie na med.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ VIVAMELOVÉ MASTI S KOŽNÍ BARIÉROU:

Před a po použití výrobku si vždy umyjte ruce.

Výrobek není určen ke konzumaci.

V případě požití může způsobit zvýšení hladiny cukru u diabetiků nebo reakce přecitlivělosti u lidí alergických na med. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. V případě neúmyslného kontaktu s očima nebo sliznicemi je vypláchněte velkým množstvím vody.

Po každém použití obal pevně uzavřete.

Pokud máte alergickou reakci na některou ze složek, přestaňte přípravek používat.

Výrobek není sterilní. Nepoužívejte na otevřené rány nebo stehy.

Výrobek je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Jakákoli závažná komplikace způsobená zdravotnickým prostředkem by měla být nahlášena výrobci nebo příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel bydliště.

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo otázky týkající se zdravotnického prostředku a jeho možných rizik, požádejte o radu zdravotnického pracovníka nebo lékárníka.

JAK UCHOVÁVAT VIVAMEL KOŽNÍ BARIÉROVOU MAST?

Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě 5 až 35 °C.

Vyhňte se přímému slunečnímu záření.

Výrobek má trvanlivost dva roky.

Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, Slovinsko; www.tosama.si

Legenda symbolu:



Spotřebujte do	Kód dávky	Podmínky skladování	Přečtěte si návod k použití	Viz návod k použití	Zdravotnický prostředek	Značka shody CE
----------------	-----------	---------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------

Datum vydání: březen 2024 / vydání č. 1