



ES

Descripción y uso previsto:

Fabricadas en un material suave que se adapta 100% al cuerpo. Cómodas, ligeras y confortables. Ejerce una compresión ligera adecuada para dolores leves o tratamientos a largo plazo.

Indicaciones:

Lumbalgias leves o moderadas, contención postoperatoria y postparto.

Precauciones:

- Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar la ortesis. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o al establecimiento donde lo haya adquirido.
- Para que la ortesis pueda ejercer su función, se debe utilizar el producto de la talla adecuada a la medida del paciente. Si el paciente se encuentra cerca de la talla máxima de una talla y presenta abdomen prominente elevar la talla inmediatamente superior.
- Respete siempre las instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares que haya prescrito el facultativo.
- El médico es la persona capacitada para prescribir y decidir la duración del tratamiento, así como su seguimiento.
- Si se nota algún efecto secundario, afección cutánea o sensibilización se ha de poner inmediatamente en conocimiento del médico. Suspenda su utilización hasta ser valorado por el especialista.
- El facultativo deberá tener en cuenta el posible uso de cremas de uso tópico, junto con el empleo de la ortesis.
- En las zonas de presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hiperensible.
- Aunque la ortesis no es de uso solo, es para un único paciente. No reutilizar en otros pacientes.
- Se recomienda que al menos la primera colocación de la ortesis se realice bien por personal cualificado (médico, técnico ortopédico, etc.) bajo su supervisión.
- El buen uso de las ortesis depende del uso de los elementos que la forman por lo que ha de ser supervisado con periodicidad. El personal sanitario que realice el seguimiento del tratamiento del paciente puede indicar al mismo la idoneidad del producto o la conveniencia de su sustitución, si el producto se ha deteriorado o desgastado.
- Se aconseja cuidar la limpieza de los cierres rápidos de microganchos para conservar su funcionalidad, eliminando los materiales que pudieran haber quedado adheridos al mismo.
- Algunos materiales del producto son no ignífugos por lo que se recomienda no utilizarlo en ambientes con exceso calor, fuego o radiaciones.
- Limpiar periódicamente el producto y mantener una correcta higiene personal.
- No llevar puesta la ortesis durante el baño, ducha, etc.
- No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

Instrucciones para una correcta colocación:

- Colocar la faja alrededor del cuerpo dejando el borde inferior a la altura de la pelvis. Presionar el delantero de la mano izquierda sobre el abdomen y ajustar hasta obtener la presión deseada, posteriormente fijar el microgancho del delantero de la derecha sobre el de la mano izquierda para mantener la compresión.
- En el caso del modelo PRS602BG si quiere ser utilizado como faja costal:** colocar la ortesis de manera que quede centrada en la zona costal, justo bajo el pecho. Presionar el delantero de la mano izquierda sobre la zona costal y ajustar hasta obtener la presión deseada, posteriormente fijar el microgancho del delantero de la derecha sobre el de la mano izquierda para mantener la compresión.

Mantenimiento del producto - Instrucciones de lavado:

Antes de lavar deben quitar todos los microganchos cerrados. Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro. No usar lejía. No secar en secadora. No planchar. No lavar en seco. No exponer a fuentes de calor directas como estufas, calefacciones, radiadores, exposición directa al sol, etc.

Nota: Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.

Poznámka: Jazykoly začervený incident související s výrobkem je nutno nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém užívatele nebo pacient pobývá.

