

NÁVOD K POUŽITÍ

HRAZDA K POLOHOVÁNÍ PACIENTA

799

Katalogové číslo:
799



CE

UM.2023.06 | REV.2023.06

 ZHONGSHAN A&J MEDICAL EQUIPMENT Co., Ltd., 3 Shenghui South Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, 528427 China

 SUNGO EUROPE B.V., Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

 DMA PRAHA s. r. o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4, Česká republika

POUŽITÍ

Hrazda k lůžku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci používat své lůžko. Hrazda usnadňuje pohyb a manipulaci pacientům i ošetřujícímu personálu a zároveň eliminuje možné riziko pádu při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost. Hlavní uplatnění nachází tam, kde není držák pro standardní hrazdu, nebo kde je třeba rychle a bez předchozí montáže dodat hrazdu pro domácí lůžka, gauče, sedačky atd.

INDIKACE

Uživatel by měl být schopen se s pomocí hrazdy posunout, otočit nebo posadit a měl by mít nezbytné fyzické, vizuální a kognitivní dovednosti pro její používání.

KONTRAINDIKACE

Uživatel by neměl mít poruchu vnímání, závažnou ztrátu rovnováhy nebo svalové síly a úrazy, dysfunkce, paralýzu, kontraktury nebo poškození kloubů na horních končetinách.

Hrazdu nedoporučujeme používat uživatelům, kteří trpí závažnými psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi, stařeckou demencí, mentálním omezením nebo slabozrakostí a slepotou. V těchto případech je vždy nutné hrazdu používat pouze s dopomocí a za přítomnosti odborné asistence!



POZOR

V případě alergických reakcí nebo zarudnutí kůže během používání hrazdy neprodleně vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním hrazdy konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.

Pro co nejbezpečnější používání hrazdy vždy upravte prostředí, kde ji budete používat.

Hrazda by měla být při předání uživateli individuálně odborně nastavena.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele. Pokud z důvodu zrakového omezení si není možné návod přečíst, vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.

Hrazdu používejte vždy jen v souladu s návodem k použití. Za následky způsobené používáním v rozporu s tímto návodem nenese dodavatel žádnou zodpovědnost.

Při skládání hrazdy postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Hrazdu nepřetěžujte a nepřekračujte jeho maximální nosnost 115 kg (viz výrobní štítek na produktu).

Při užívání hrazdy musí hrazda stát na stabilní rovné podlaze a celá základna být v kontaktu s podkladem.

Hrazda je určena pouze k vertikálnímu přitažení. Nikdy nepoužívejte k tahu do stran, ani jiným způsobem, kde by mohlo dojít k narušení její stability.

POPIS

Hrazda je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti s povrchovou úpravou komaxit (slonová kost). Skládá se ze stabilní základny s ramenem, které se dá rozložit na dvě části a hrazdičku s rukojetí. Je vybavena dvěma aretačními šrouby, které slouží k pevnému propojení základny a ramena.



POZOR

Obrázky uvedené v návodu slouží pouze k upřesnění pokynů a mohou se od dodávaného výrobku lišit.

POUŽITÉ SYMBOLY

Identifikační a výstražné štítky na chodítku musí zůstat čitelné a nesmí být odstraněny. V případě nečitelnosti, mechanického opotřebení nebo chybějících štítků ihned kontaktujte dodavatele.



Zdravotnický prostředek

Označuje, že daný prostředek je zdravotnický prostředek.



Evropská shoda

Označením CE na produktu výrobce prohlašuje, že produkt odpovídá základním požadavkům evropské legislativy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 (MDR).



Katalogové číslo

Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.



Sériové číslo

Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné konkrétní zdravotnický prostředek identifikovat.



Čárový kód

Unikátní jednotná mezinárodní číselná identifikace produktu.



Viz návod k použití

Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití.



Upozornění

Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití, kde jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a upozornění, která z různých důvodů není možné uvádět na vlastním zdravotnickém prostředku.



Maximální nosnost

Označuje maximální nosnost uživatele pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.



Datum výroby

Označuje, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.



Výrobce

Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je definován nařízeními EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.



Zplnomocněný zástupce v EU

Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.



Dovozce

Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží.



Distributor


Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek distribuuje.



Přeškrtnutá popelnice

Produkt nesmí být vytríděn ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu, a je nutné ho odevzdat k ekologické likvidaci v rámci obce nebo dodavatelé.

LIKVIDACE

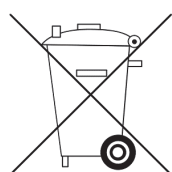

Ekologická likvidace hrazdy se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na místním městském nebo obecním úřadě. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na dodavatele.

VYBALENÍ HRAZDY A UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechny hrazdy jsou výrobcem pečlivě kontrolovány a zabaleny pro dodání uživateli. Před tím, než hrazdu rozbalíte se ujistěte, že krabice není poškozena. Po vybalení hrazdy z krabice zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny její části, včetně uživatelské příručky pro bezpečné používání hrazdy. Po důkladné kontrole hrazdy ji autorizovaný odborník dodavatele nastaví pro konkrétního uživatele, předá mu pokyny ohledně důležitých upozornění bezpečného provozu v souladu s tímto návodem a ujistí se, že uživatel těmto pokynům rozumí.




POZOR


Obalový materiál a další různé ochranné části musí být ekologicky zlikvidovány!

SLOŽENÍ HRAZDY


Umístěte základnu na rovnou podlahu a zasuňte držák ramena hrazdy do otvoru v základně (1) a pevně zašroubujte po směru hodinových ručiček aretační šroub (A). Tento postup opakujte také u zasunutí ramena hrazdy do držáku (2) a utáhněte aretačním šroubem (B). Navlékněte nastavitelný popruh s hrazdičkou na vrchol ramena mezi vymezovací zářázky (3) a dle potřeby nastavte délku textilního popruhu hrazdičky pomocí jeho provléknutím plastovou sponou (C). Ujistěte se, že popruh je bezpečně zajištěn.

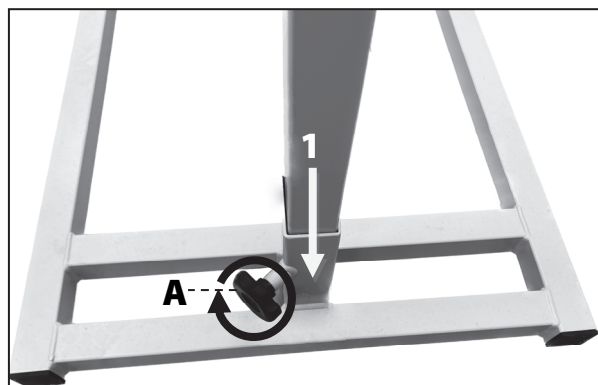

Upevnění držáku ramena hrazdy do základny.

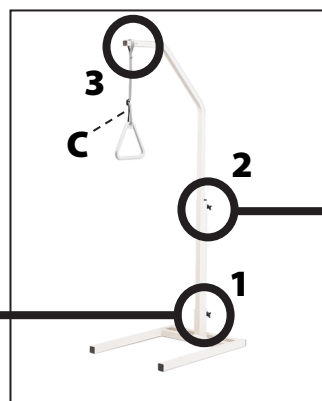

Složení a nastavení hrazdy

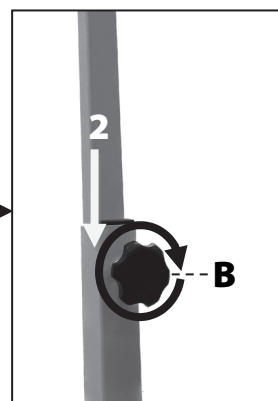

Upevnění ramena hrazdy do držáku.

ÚDRŽBA A SERVIS

Hrazdu lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků a stav popruhů hrazdičky, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované popruhy hrazdičky. K opravě je nutné použít pouze originální náhradní díly. V opačném případě zaniká jakákoliv záruka a dodavatel se zříká veškeré zodpovědnosti v případě nehody nebo zranění. Je-li potřeba důkladnější kontrola technického stavu nebo oprava, vždy kontaktujte pouze autorizované servisní středisko, které Vám poskytne veškeré informace a servis. Hrazdu skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.