

# NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTAVEC NA WC S MADLY

## 510 E

Katalogové číslo:  
510 E (BA 312A)



**CE**

UM.2024.06 | REV.2024.06



SUNSHINE HEALTHCARE CO., LTD., No. 31 Jihua Eastern road, Nanhai, Foshan, China



SUNGO EUROPE B.V., Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



DMA PRAHA s. r. o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4, Česká republika

## POUŽITÍ

Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

## INDIKACE

Uživatel by měl být schopen samostatného sedu na nástavci a mít nezbytné fyzické, vizuální a kognitivní dovednosti pro jeho používání.

## KONTRAINDIKACE

Uživatel by neměl mít poruchu vnímání, koordinace nebo závažnou ztrátu rovnováhy. Nástavec nedoporučujeme používat uživatelům, kteří trpí závažnými psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi, stařeckou demencí, mentálním omezením nebo slabozrakostí a slepotou. V těchto případech je vždy nutné nástavec používat pouze s dopomocí a za přítomnosti odborné asistence!



### POZOR

*V případě alergických reakcí, zarudnutí kůže, popř. vzniku otlaků, neprodleně vyhledejte lékaře.*

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.

Pro co nejbezpečnější používání nástavce vždy upravte prostředí, kde jej budete používat.

Nástavec by měl být nejprve odborně zaměřen a při předání uživateli individuálně nastaven.

Před prvním použitím nástavce si pečlivě přečtěte tento návod a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele. Pokud z důvodu zrakového omezení si není možné návod přečíst, vyžádejte si elektronickou verzi k přečtení softwarovou aplikací nebo osobní instruktáž.

Nástavec používejte vždy jen v souladu s návodem k použití. Za následky způsobené používáním v rozporu s tímto návodem nenese dodavatel žádnou zodpovědnost.

Při instalaci nástavce na toaletu postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 136 kg (viz výrobní štítek na produktu).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.

Nástavec nikdy nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozen nebo jsou patrné známky výrazného opotřebení.

Před každým použitím zkontrolujte, že jsou všechny nohy v kontaktu s podkladem a ve stabilní poloze.

Pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.

## POPIS

Přenosný nástavec se skládá ze dvou částí – plastového toaletního nástavce, který je opatřen plastovým sedátkem s poklopem a podpůrné duralové konstrukce s madly. Opěrné nohy umožňují výškové nastavení nástavce, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci a aretačními „E“ pojistkami.



### POZOR

*Obrázky uvedené v návodu slouží pouze k upřesnění pokynů a mohou se od dodávaného výrobku lišit.*

## VYBALENÍ NÁSTAVCE A UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechny nástavce jsou výrobcem pečlivě kontrolovány a zabaleny pro dodání uživateli. Před tím, než nástavec rozbalíte se ujistěte, že obal není poškozen. Po vybalení nástavce z obalu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny jeho části, tj. plastové sedátko, konstrukci s madly, čtyři podpůrné nohy s pryžovými nástavci a „E“ pojistkami, včetně uživatelské příručky pro bezpečné používání nástavce. Po důkladné kontrole nástavce ho autorizovaný odborník dodavatele nainstaluje, předá uživateli pokyny ohledně důležitých upozornění bezpečného provozu v souladu s tímto návodem a ujistí se, že uživatel těmto pokynům rozumí.




### POZOR

*Obalový materiál a další různé ochranné části musí být ekologicky zlikvidovány!*

## NASTAVENÍ VÝŠKY NÁSTAVCE:

Nástavec je přednastaven na nejnižší polohu. Pro nastavení výšky nástavce vytáhněte „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. „E“ pojistku pak zaklapněte zpět do otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou, které musí být nastaveny stejně. Výška toalety s nástavcem by měla být shodná s výškou podkolenní jamky od země. Při sedu by tak kolenní i kyčelní kloub měl svírat pravý úhel 90°. Optimální výšku nástavce vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

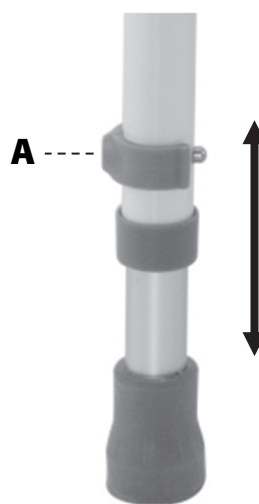

### POZOR

*Po nastavení požadované výšky a před každým použitím vždy zkontrolujte, že jsou všechny „E“ pojistky správně zaklaplé, nohy v kontaktu s podkladem a nástavec je ve stabilní vodorovné poloze.*

## ÚDRŽBA A SERVIS

Nástavec po každém použití hygienicky ošetřete. Čistěte omytím vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1 min | 85 °C). Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce. K opravě je nutné použít pouze originální náhradní díly. V opačném případě zaniká jakákoliv záruka a dodavatel se zříká veškeré zodpovědnosti v případě nehody nebo zranění. Je-li potřeba důkladnější kontrola technického stavu nebo oprava, vždy kontaktujte pouze autorizované servisní středisko, které Vám poskytne veškeré informace a servis. Nástavec skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

## LIKVIDACE



Ekologická likvidace nástavce se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na místním městském nebo obecním úřadě. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na dodavatele.

## POUŽITÉ SYMBOLY

Identifikační a výstražné štítky na nástavci musí zůstat čitelné a nesmí být odstraněny. V případě nečitelnosti, mechanického opotřebení nebo chybějících štítků ihned kontaktujte dodavatele.



### Zdravotnický prostředek

Označuje, že daný prostředek je zdravotnický prostředek.



### Evropská shoda

Označením CE na produktu výrobce prohlašuje, že produkt odpovídá základním požadavkům evropské legislativy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 (MDR).



### Katalogové číslo

Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.



### Sériové číslo

Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné konkrétní zdravotnický prostředek identifikovat.



### Čárový kód

Unikátní jednotná mezinárodní číselná identifikace produktu.



### Viz návod k použití

Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití.



### Upozornění

Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití, kde jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a upozornění, která z různých důvodů není možné uvádět na vlastním zdravotnickém prostředku.



### Maximální nosnost

Označuje maximální nosnost uživatele pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.



### Datum výroby

Označuje, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.



### Výrobce

Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je definován nařízeními EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.



### Zplnomocněný zástupce v EU

Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.



### Dovozce

Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží.



### Distributor

Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek distribuuje.



### Přeškrtnutá popelnice

Produkt nesmí být vytríděn ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu, a je nutné ho odevzdat k ekologické likvidaci v rámci obce nebo dodavateli.