

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTAVEC NA WC S MADLY

580

Katalogové číslo:
580



CE

UM.2023.06 | REV.2023.06

 ZHONGSHAN A&J MEDICAL EQUIPMENT Co., Ltd., 3 Shenghui South Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, 528427 China

 SUNGO EUROPE B.V., Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

 DMA PRAHA s. r. o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4, Česká republika

POUŽITÍ

Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

INDIKACE

Uživatel by měl být schopen samostatného sedu na nástavci a mít nezbytné fyzické, vizuální a kognitivní dovednosti pro jeho používání.

KONTRAINDIKACE

Uživatel by neměl mít poruchu vnímání, koordinace nebo závažnou ztrátu rovnováhy. Nástavec nedoporučujeme používat uživatelům, kteří trpí závažnými psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi, stařeckou demencí, mentálním omezením nebo slabozrakostí a slepotou. V těchto případech je vždy nutné nástavec používat pouze s dopomocí a za přítomnosti odborné asistence!



POZOR

V případě alergických reakcí, zarudnutí kůže, popř. vzniku otlaků, neprodleně vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.

Pro co nejbezpečnější používání nástavce vždy upravte prostředí, kde jej budete používat.

Nástavec by měl být nejprve odborně zaměřen a při předání uživateli individuálně nastaven.

Před prvním použitím nástavce si pečlivě přečtěte tento návod a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele. Pokud z důvodu zrakového omezení si není možné návod přečíst, vyžádejte si elektronickou verzi k přečtení softwarovou aplikací nebo osobní instruktáž.

Nástavec používejte vždy jen v souladu s návodem k použití. Za následky způsobené používáním v rozporu s tímto návodem nenes dodavatel žádnou zodpovědnost.

Při instalaci nástavce na toaletu postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 120 kg (viz výrobní štítek na produktu).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.

Nástavec nikdy nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozen nebo jsou patrné známky výrazného opotřebení.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástavec k toaletě bezpečně a stabilně připevněn.

Pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.

POPIS

Nástavec je vyroben z odolného voděodolného polyuretanu. Je doplněn odklopným prkénkem s poklopem a odklopnými madly z ocelových trubek s polstrovanými područkami. Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability během používání, je nástavec ve spodní části vybaven dvěma aretačními šrouby s plastovými maticemi, které fixují správnou polohu nástavce proti posunutí. Výšku nástavce lze nastavit ve třech polohách po 4 cm na 8, 12 nebo 16 cm.



POZOR

Obrázky uvedené v návodu slouží pouze k upřesnění pokynů a mohou se od dodávaného výrobku lišit.

POUŽITÉ SYMBOLY

Identifikační a výstražné štítky na nástavci musí zůstat čitelné a nesmí být odstraněny. V případě nečitelnosti, mechanického opotřebení nebo chybějících štítků ihned kontaktujte dodavatele.



Zdravotnický prostředek

Označuje, že daný prostředek je zdravotnický prostředek.



Evropská shoda

Označením CE na produktu výrobce prohlašuje, že produkt odpovídá základním požadavkům evropské legislativy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 (MDR).



Katalogové číslo

Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.



Sériové číslo

Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné konkrétní zdravotnický prostředek identifikovat.



Čárový kód

Unikátní jednotná mezinárodní číselná identifikace produktu.



Viz návod k použití

Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití.



Upozornění

Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití, kde jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a upozornění, která z různých důvodů není možné uvádět na vlastním zdravotnickém prostředku.



Maximální nosnost

Označuje maximální nosnost uživatele pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.



Datum výroby

Označuje, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.



Výrobce

Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je definován nařízeními EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.



Zplnomocněný zástupce v EU

Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.



Dovozce

Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží.



Distributor


Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek distribuuje.



Přeškrtnutá popelnice

Produkt nesmí být vytríděn ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu, a je nutné ho odevzdat k ekologické likvidaci v rámci obce nebo dodavateli.

LIKVIDACE

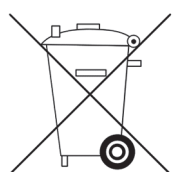

Ekologická likvidace nástavce se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na místním městském nebo obecním úřadě. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na dodavatele.

VYBALENÍ NÁSTAVCE A UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechny nástavce jsou výrobcem pečlivě kontrolovány a zabaleny pro dodání uživateli. Před tím, než nástavec rozbalíte se ujistěte, že obal není poškozen. Po vybalení nástavce z obalu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny jeho části, tj. nástavec, prkénko s víkem, odklopná madla a aretační šrouby s plastovými maticemi, včetně uživatelské příručky pro bezpečné používání nástavce. Po důkladné kontrole nástavce ho autorizovaný odborník dodavatele nainstaluje, předá uživateli pokyny ohledně důležitých upozornění bezpečného provozu v souladu s tímto návodem a ujistí se, že uživatel těmto pokynům rozumí.




POZOR


Obalový materiál a další různé ochranné části musí být ekologicky zlikvidovány!

NASTAVENÍ VÝŠKY NÁSTAVCE:

Nástavec je přednastaven na střední výšku 12 cm. Pokud ji chcete zvýšit nebo snížit, povolte všechny čtyři aretační šrouby (A), vyjměte plastové krytky příslušných otvorů (B), nastavte obě podpůrné hrazdy (C, D) do požadované polohy (8 cm nebo 16 cm), kterou zafixujete opětovným utážením všech čtyř šroubů.

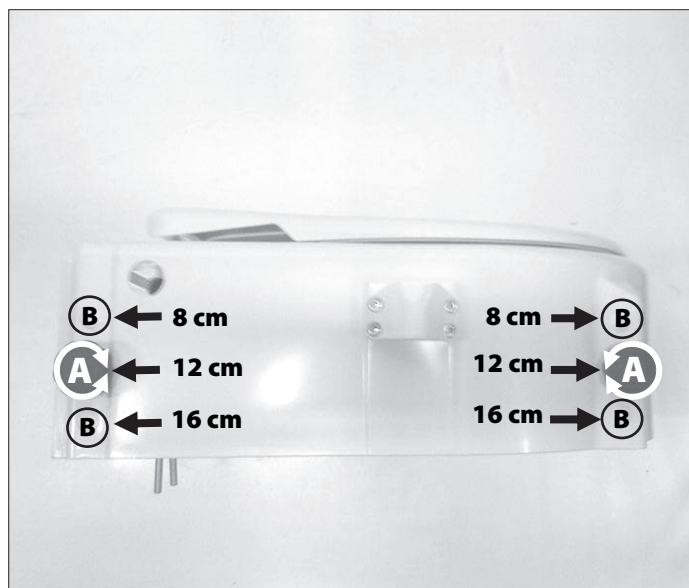

Nastavení výšky nástavce.

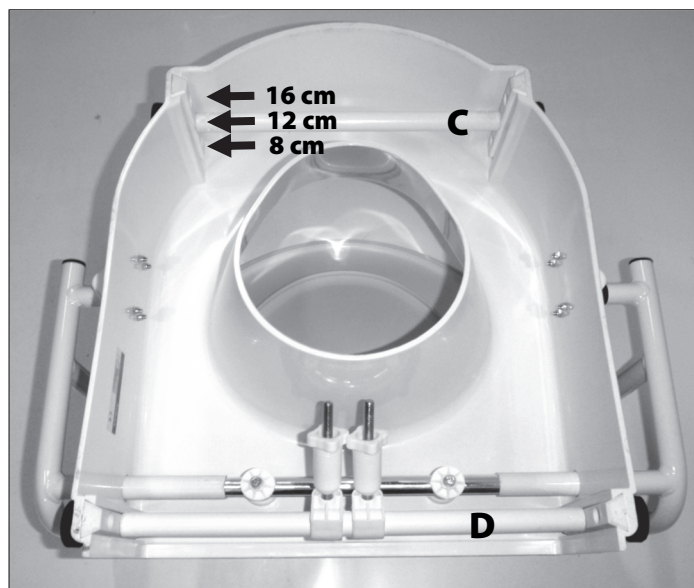

Výběr ze 3 výšek nástavce.



POZOR

Výška toalety s nástavcem by měla být shodná s výškou podkolenní jamky od země. Při sedu by tak kolenní i kyčelní kloub měl svírat pravý úhel 90°. Optimální výšku nástavce vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.



POZOR


Před montáží nástavce k toaletní míse se ujistěte, že jsou obě hrazdy včetně jejich konců ve stejně zvolených polohách, je zvolena správná výška (viz výš) a nástavec na toaletě sedí ve stabilní vodorovné poloze.

PŘIPEVNĚNÍ ODKLOPNÝCH MADEL:

Zamáčkněte aretační „V“ pojistku (E), madlo zasuněte nadoraz do bočního otvoru (F) na straně nástavce tak, aby pojistka prošla skrz a pojistku uvnitř rámu nástavce uvolněte. Postup opakujte stejným způsobem i u druhého madla.



Umístění aretační „V“ pojistky.

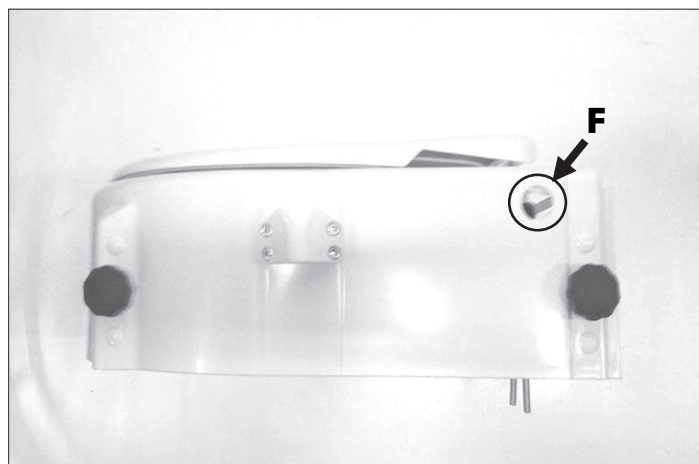

Otvor pro zasunutí madel na boku nástavce.

**POZOR**


Ujistěte se, že madla správně doléhají a obě pojistky jsou bezpečně zaaretovány uvnitř nástavce (viz obr.).

PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Z toaletní mísy odinstalujte prkénko s poklopem, umístěte nástavec na okraj mísy tak, aby s ní byl v co nejtěsnějším kontaktu, posuňte rozteč šroubů (G) na podpůrné hrazdě (D) tak, aby odpovídala rozteči děr na míse určených pro montáž prkénka, šrouby (G) bez matic (H) jimi prostrčte a plastovými maticemi (H) ze spodu pevně dotáhněte.

**POZOR**

Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástavec k toaletě bezpečně a stabilně připevněn.

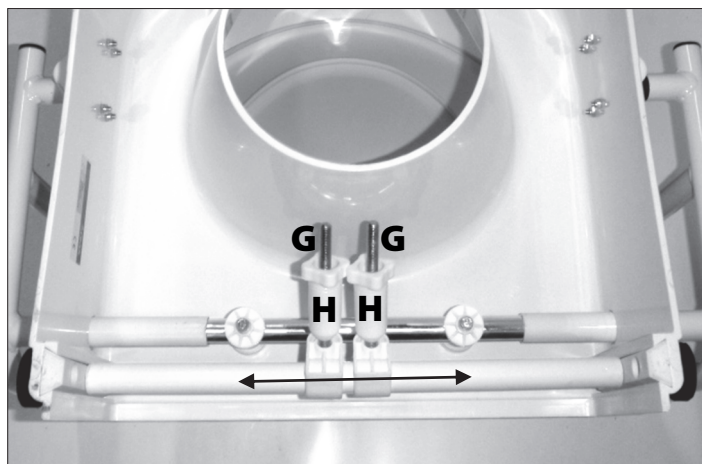

Nastavení rozteče šroubů odpovídající otvorům na míse.



Přípevnění nástavce na toaletní mísu.

ÚDRŽBA A SERVIS

Nástavec po každém použití hygienicky ošetřete. Čistěte omytím vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1 min | 85 °C). Pro zachování maximální stability a funkčnosti nástavce doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků včetně gumových podložek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované fixační patky. K opravě je nutné použít pouze originální náhradní díly. V opačném případě zaniká jakákoliv záruka a dodavatel se zříká veškeré zodpovědnosti v případě nehody nebo zranění. Je-li potřeba důkladnější kontrola technického stavu nebo oprava, vždy kontaktujte pouze autorizované servisní středisko, které Vám poskytne veškeré informace a servis. Nástavec skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.