

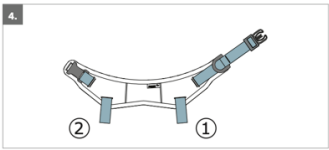
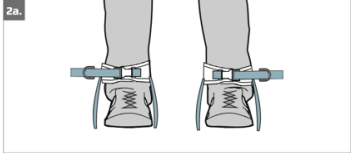
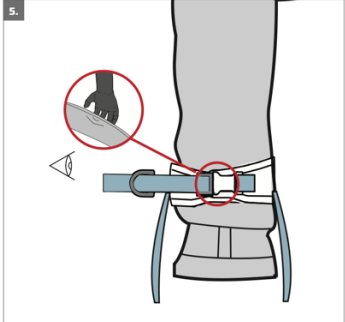
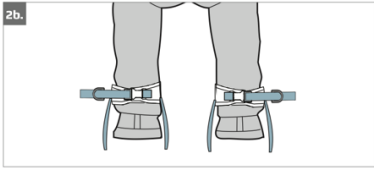

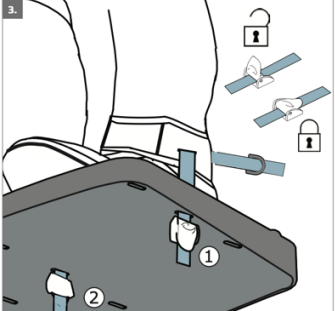



## MANŽETY KOKTNÍKOVÉ POLSTROVANÉ

### Instrukce pro uživatele

1. Dítě změřte a zvolte správnou velikost
2. Aplikujte dle návodu níže

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>XS</th> <th>M</th> <th>XL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160–230 mm</td> <td>230–310 mm</td> <td>290–380 mm</td> </tr> </tbody> </table>	XS	M	XL	160–230 mm	230–310 mm	290–380 mm
XS	M	XL					
160–230 mm	230–310 mm	290–380 mm					
							
							
							
							

**Další poradenství a instrukce:**

Nejaktuálnější verze všech instrukcí je vždy dostupná na webu REHA 2015, odkud se dá stáhnout a i vytisknout. Produkt musí sestavovat a nasazovat kvalifikovaný zdravotník.

Uživatele nikdy neponechávejte bez dozoru. Zajistěte trvalý dohled dospělé osoby. Neúmyslné uvolnění tohoto výrobku může způsobit, že uživatel spadne dopředu nebo do strany.

**Upozornění:**

1. U osob, u kterých hrozí riziko postupného omezení rozsahu pohybu v bocích, kolenou nebo hlezenním kloubu, je nutné zajistit období, kdy se uživatel může pohybovat a měnit polohu nohou.
2. U osob, které trpí vážnou či úplnou poruchou neúmyslných pohybových funkcí nohou, pozorně sledujte, jak používání produktu ovlivňuje zbytek těla.

Zkontrolujte napnutí popruhů, neměly by být ani příliš utažené, ani příliš volné. Průběžně je nutné provádět aktivity pro uvolnění tlaku a kontrolovat, že nedošlo k poškození kůže. Při zarudnutí pokožky, podráždění či jiných známkách diskomfortu přestaňte produkt používat a poraďte se se svým lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem o správném použití  
Udržujte v čistotě a tím zajistěte optimální funkčnost.

Řemínky na kotníky se vždy musí používat společně s kyčelním pásem, pánevním pásem nebo podobnými produkty.

Max. hmotnost uživatele: 120 kg

Kontrola CZ: Inspekce

Partner pro ČR a SR:

**REHA 2015, s.r.o.**  
Bohunická 576/52  
619 00 Brno  
[info@reha2015.cz](mailto:info@reha2015.cz)  
[reha2015.cz](http://reha2015.cz)