

Návod k použití

TRACOE® Sprchový Chráníč REF 915

TRACOE sprchový chráníč zabraňuje vniknutí vody do tracheostomatu při sprchování nebo mytí vlasů.

Sprchový chráníč je vyroben ze silikonu. Zavazuje se kolem krku a zapíná se na knoflík. V tomto procesu musí být chráníč umístěn přes tracheostoma. Na spodní straně chráníče jsou umístěny otvory pro přívod vzduchu, které jsou vyztuženy kovovými nýty. Těmito otvory může proudit dýchaný vzduch dovnitř a ven.

UPOZORNĚNÍ: Při nasazování sprchového chráníče je třeba dbát na to, aby otvory pro přívod vzduchu byly vždy pod tracheostomatem, aby do něj při sprchování nemohla shora pronikat voda.

Díky integrované drátěné sponě si sprchový chráníč zachovává svůj tvar i při sprchování, protože se tak chráníč nemůže zhroutit. Sprchový chráníč lze nastavit na všechny šířky krku.


UPOZORNĚNÍ: Sprchový chráníč do značné míry zabraňuje pronikání vody do tracheostomatu. Při jeho používání je zapotřebí zvláštní opatrnosti, protože nelze dosáhnout 100% utěsnění. Z tohoto důvodu nikdy nesměřujte proud vody přímo na krk nebo tracheostoma.

Po použití by se měl sprchový chráníč očistit mýdlem a vodou a poté usušit hadříkem, který nepouští vlákna. Je potřeba poznamenat, že časté používání sprchového chráníče časem způsobí zkrěhnutí a roztažení materiálu. V tomto případě by se sprchový chráníč již neměl používat a měl by být nahrazen jiným produktem.

Obsah balení: 1 kus.



Pozor.
Prostudujte si
návod k použití.

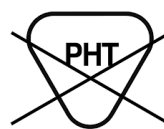

Bez obsahu
ftalátů
(např. DEHP)



Není vyrobeno
z přírodního
latexu



Manufacturer

TRACOE medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1 / 3
55268 Nieder-Olm / Germany
Tel.: +49 6136 9169-0, Fax: +49 6136 9169-200
info@tracoe.com, www.tracoe.com

2016-02
10437
5.0