



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Dlaha pro fixaci
prstů ruky
typ B

Dlaha pro fixaci prstů ruky typ B

Určený účel

Dlaha pro fixaci prstů typ B je určena k imobilizaci distálního interfalangeálního kloubu (DIP) prstu ruky v nulovém postavení při pooperačních a poúrazových stavech tohoto kloubu.

Vlastnosti z hlediska účinnosti

Pevná plastová skořepa fixovaná na prstu páskem, imobilizuje distální interfalangeální kloub (DIP) prstu ruky v nulovém postavení.

Indikace

Stavy po operaci v oblasti DIP kloubu prstu ruky či distálního článku prstu.

Distorze DIP.

Doléčení stavů po avulzních poraněních extenzoru prstu.

Zánětlivé afekce v oblasti distálního článku prstu či DIP.

Kontraindikace

Těžké degenerativní změny v oblasti prstů ruky vylučující použití dlahy.

Zbytkové riziko

Není známo.

Cílová skupina

Pacienti s výše uvedenou indikací poučení odborníky z daného klinického oboru.

Upozornění pro pacienta

- Dlahu používejte pouze pro určený účel.
- Dlaha je nesterilní a je určena pro jedno použití!!
Při opakovaném použití hrozí riziko neschopnosti dodržet hygienickou bezpečnost a možnosti vzniku infekce.
- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- Dlaha se po aplikaci na prst fixuje náplastí nebo obvazem.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Velikosti **0** **1** **2** **3** **4** **5**

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení dlahy způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Zdravotnický prostředek **MD**
je určený pro jednoho pacienta 
a nesmí být použit opakovaně 
Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením .



Handicap trade s.r.o.
Bystrcká 612/15
624 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
www.berle.cz

Datum poslední revize: 1.10.2023

