

RIGENOMA® ČISTICÍ ROZTOK BEZ OPLACHOVÁNÍ s patentovanou složkou OzolIE® umožňuje atraumatickou a bezbolestnou očistu poraněné kůže bez ohledu na etiologii léze. Kombinace unikátní patentované složky OzolIE® s kyselinou mléčnou s pH 4,2 vytváří nepříznivé prostředí pro množení mikrobů. Použití decyl glukosidu (neagresivní povrchově aktivní látky) zajišťuje zachování hydrolipidového filmu pokožky. RIGENOMA® čistící roztok bez oplachování nenarušuje okraj léze, není agresivní, zlepšuje výživu neporušené kůže, snadno a účinně odstraňuje nečistoty a zbytky předchozích léčivých přípravků.

HLAVNÍ SLOŽKY: voda (ozonizovaná), OzolIE® (stabilní ozonidy), kyselina mléčná, decyl glukosid

INDIKACE

RIGENOMA® čistící roztok bez oplachování je určen pro atraumatické a bezbolestné čištění kožních lézí jakékoli etiologie při plném respektování neporušené okolní kůže. Snadno se používá, účinně odstraňuje zbytky předchozích léčivých přípravků. Přípravek se neoplachuje.

RIGENOMA® ČISTIACI ROZTOK BEZ OPLACHOVANIA s patentovanou zložkou OzolIE® umožňuje atraumatickú a bezbolestnú očistu poranenej kože bez ohľadu na etiológiu lézie. Kombinácia OzolIE® s kyselinou mliečnou s pH 4,2 vytvára nepriaznivé prostredie pre množenie mikróbov. Použitie decyl glukozidu (neagresívnej povrchovo aktívnej látky) zabezpečuje zachovanie hydrolipidového filmu pokožky. RIGENOMA® čistiaci roztok bez oplachovania rešpektuje okraj lézie, nie je agresívny, zlepšuje výživu neporušenej kože, ľahko a účinne odstraňuje nečistoty a zvyšky predchádzajúcich liečivých prípravkov.

HLAVNÉ ZLOŽKY: voda (ozónovaná), OzolIE® (stabilné ozonidy), kyselina mliečna, decyl glukozid.

INDIKÁCIE

RIGENOMA® čistiaci roztok bez oplachovania je určený na atraumatické a bezbolestné čistenie kožných lézií akejkoľvek etiológie pri plnom rešpektovaní neporušenej okolitej kože. Ľahko sa používa, účinne odstraňuje zvyšky predchádzajúcich liečivých prípravkov. Prípravok sa neoplachuje.


Výhradní distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com www.ozonidy.cz www.ozonidy.sk



LOT



RIGENOMA®

ČISTICÍ ROZTOK BEZ OPLACHOVÁNÍ

Na poraněnou kůži

- Atraumatické a bezbolestné čištění
- Efektivní odstranění nečistot a zbytků léčiv
- Respektuje okraj rány a reepitelizační hranici
- Zlepšuje výživu neporušené pokožky
- Neagresivní

Pre poranenú kožu

- Atraumatické a bezbolestné čistenie
- Efektívne odstránenie nečistôt a zvyškov liečiv
- Rešpektuje okraj rany a reepitelizačnú hranicu
- Zlepšuje výživu neporušenej pokožky
- Neagresívny



750 ml

POUŽITÍ: Navlhčete celou postiženou oblast včetně rány čistícím roztokem RIGENOMA® bez oplachování a očistěte suchou gázou (z netkané textilie).

UPOZORNĚNÍ

Pro vnější použití. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a po uplynutí data spotřeby. Datum expirace se vztahuje na neporušený a správně skladovaný produkt. V případě náhodného kontaktu s očima je důkladně po dlouhou dobu oplachujte. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky a pokračujte v proplachování očí. Uchovejte v chladu a suchu, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Skladujte mezi 5 °C a 35 °C. Před použitím zdravotnického prostředku si dobře umyjte ruce. Po použití lahev pečlivě uzavřete. Po otevření se doporučuje spotřebovat do 6 měsíců. Čistící roztok RIGENOMA® bez oplachování je dobře snášen. Nejsou známy žádné případy senzibilizace nebo vedlejších účinků. Nepoužívejte v případě zjištěné přecitlivělosti na některou ze složek. Pokud k tomuto jevu dojde, přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem. Nejsou známy žádné kontraindikace ani vedlejší účinky v období těhotenství a kojení.

POUŽITIE: Navlhčíte celú postihnutú oblasť vrátane rany čistiacim roztokom RIGENOMA® bez oplachovania a očistíte suchou gázou (z netkanej textílie).

UPOZORNENIE

Na vonkajšie použitie. Nepožívajzte. Uchovávajzte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený a po dátume spotreby. Dátum expirácie sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný produkt. V prípade náhodného kontaktu s očami ich dôkladne dlhý čas oplachujte. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky a pokračujte v preplachovaní očí. Uchovajte v chlade a suchu, mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Skladujte medzi 5°C a 35°C. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si dobre umyte ruky. Po použití fľašu dôkladne uzavorte. Po otvorení sa odporúča spotrebovať do 6 mesiacov. Čistiaci roztok RIGENOMA® bez oplachovania je dobre znášaný. Nie sú známe žiadne prípady senzibilizácie alebo vedľajších účinkov. Nepoužívajte v prípade precitlivenosti na niektorú z pomocných látok. Ak k tomuto javu dôjde, prestaňte užívať tento prípravok a poraďte sa so svojím lekárom. Nie sú známe žiadne kontraindikácie ani vedľajšie účinky počas gravidity a laktácie.

BEZ SLS a SLES
BEZ ALERGENŮ BEZ BARVIV
BEZ LEPKU

Zdravotnický prostředek
Zdravotnícka pomôcka

 **ERBAGIL s.r.l.**
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com



REV. 01/01/2023
RIGENOMA® ČISTICÍ ROZTOK BEZ OPLACHOVÁNÍ
750 ml ERBAGIL S.R.L.