

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

v rukou držíte zdravotní pás k ošetření pupeční kýly. Užité vlastnosti tohoto výrobku podpoříte jeho správným ošetřováním či užíváním.

BrownGuard 700 pás kýlní pupeční typ 01 je vyroben z 3D pleteniny. Materiály použité na jeho výrobu jsou nedráždivé a neobsahují latex. V pupečním kýlním pásu je integrována pelota, která zabraňuje dalšímu rozvoji pupeční kýly. Pupeční kýlní pás se zapíná na suchý zip. Mechanismus účinku pupečního kýlního pásu je založen na cíleném tlaku prostřednictvím peloty na oblast pupku, čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 700 pás kýlní pupeční typ 01

Varianty zdravotnického prostředku:

- vel. S - XL

Uživatelský profil:

BrownGuard 700 pás kýlní pupeční typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek brání rozvinutí pupeční kýly.

Indikace:

- ošetření pupeční kýly
- prevence rozvoje pupeční kýly na přechodné období do provedení operačního výkonu

Pokud pupeční kýlní pás používáte poprvé, je vhodné jeho použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, popř. aby byl zdravotní stav lékařem pravidelně kontrolován.

Kontraindikace:

- podrážděná nebo jinak porušená pokožka
- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití pupečního kýlního pásu a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacienti s rozvinutou pupeční kýlou a dále pacienti s výše zmíněnými indikacemi. Pupeční kýlní pás je určen k použití na zdravou, neporušenou pokožku. Pupeční kýlní pás je určen pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. Použití pupečního kýlního pásu v těhotenství konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti. U příliš pevně upnutého pupečního kýlního pásu může dojít k otlakům nebo zhoršení prokrvení vlivem stlačení cév. U vnímavých a přecitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je pupeční kýlní pás vyroben.

Jak zvolit správnou velikost pupečního kýlního pásu:

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit pouze změřením obvodu v místě označeném na obrázku.


Upozornění:

Jakékoliv náznaky vedoucí k rozvoji pupeční kýly by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy s možným vznikem pupeční kýly pozorovali poprvé, poraďte se před používáním pupečního kýlního pásu s Vaším lékařem. Nezačínejte samoléčbu pupečním kýlním pásem, pokud neznáte příčinu nestability v oblasti pupku. Kombinaci s jinými zdravotnickými prostředky je nutné vždy konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.

- k měření používejte krejčovský metr
- měřte vestoje
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení pupečního kýlního pásu

velikostní tabulka

obvod v bodě t			
S	M	L	XL
70-88 cm	88-106 cm	106-124 cm	124-142 cm

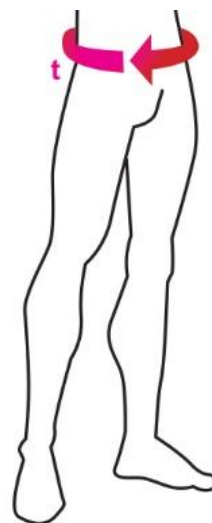

Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti pupečního kýlního pásu nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce.

Pokud si nejste jisti s aplikací pupečního kýlního pásu, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb a požádejte o ukázkou správné techniky použití.

Správně zvolená velikost:

- pociťujete znatelný, nikoliv však nepříjemný tlak v oblasti pupku

- pupeční kýlní pás při chůzi nesjíždí a neshrnuje se
- pupeční kýlní pás v žádném místě neškrť

Údaje o velikosti a výrobci najdete na etiketě všité u okraje pupečního kýlního pásu.

Aplikace pupečního kýlního pásu:

Část pupečního kýlního pásu s pelotou přiložte na pupeční kýlu a následně pás pomocí suchého zipu dotáhněte tak, abyste pociťovali přiměřený tlak. Dbejte na to, aby pás nebyl překroucen. V případě viditelného mechanického poškození pupeční kýlní pás dále nenoste a nejlépe vyměňte za nový.

Ošetřování a údržba:

BrownGuard 700 pás kýlní pupeční typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití jednou osobou. Svou účinnost a bezpečnost si zachovává po dobu 12-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- pupeční kýlní pás lze prát v pračce (maximální teplota praní 30°C, mírný postup) mýdlovým roztokem nebo speciálním přípravkem pro praní bandáží, v ochranném obalu (prací sáček)
- nepoužívejte aviváž
- nepoužívejte odstředování, mokrý pupeční kýlní pás vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- pupeční kýlní pás nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 120
- skladujte v suchu a v temnu, nejlépe v originálním obalu
- do pupečního kýlního pásu nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastříhávejte okraje
- zvýšenou pozornost věnujte suchému zipu:
 - pokud suchý zip přijde do přímého kontaktu s pleteninou, může dojít k jejímu poškození
 - pokud se suchý zip dostává do styku s jinými materiály (tkaniny, textilní vlákna, nečistoty), může dojít k jeho částečnému nebo úplnému znehodnocení a ztrátě funkčnosti
- pupeční kýlní pás nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělicími přípravky

Informace o době použitelnosti (expiraci) zdravotnického prostředku je uvedena na etiketě na jeho obalu.

Ošetřovací symboly:



®



Nepoužívat aviváž

Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat pokud:

- se objeví známky mechanického poškození (pupeční kýlní pás vyměňte za nový)

- pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním pupečního kýlního pásu - v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem

Složení:

PA, PU, PES, plast

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Pupeční kýlní pás je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měl být pupeční kýlní pás zlikvidován jako infekční materiál.

Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitý pupeční kýlní pás nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen:

Česká republika	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Slovensko	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Polsko	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Německo	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Rusko	Roszdraznadzor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukrajina	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kyiv, 01601
Austrálie	The Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

Výrobce:

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Datum poslední revize textu: 24.05.2024

