

NÁVOD K POUŽITÍ LÍMEC KRČNÍ
MODEL: AT53069 (LÍMEC KRČNÍ MĚKKÝ)
MODEL: AT53070 (LÍMEC KRČNÍ Z VÝSTUHOU)

V závislosti na modelu se používají v případě zranění krku vyžadujících malou (měkké límce) nebo střední (tuhé límce) stabilizaci. Uvolňují krční páteř a udržují krk v přirozené poloze, mírně snižují rozsah jeho pohybů. Límec by měl být nasazen a odstraněn ze zadní strany suchým zipem.

Límec by se měl prát ručně ve vlažné vodě. Nepoužívejte bělidla. Nežehlit a neprat nasucho.

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Ortéza musí být vždy používána pouze v souladu s tímto návodem k použití.

Nepoužívejte límec, pokud jste používali zahřívací masti nebo gely.

POZOR:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

NEŽADOUCÍ PŘÍHODA: V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.

Rozměr	S	M	L
Výška límce	8	8	8
Obvod krku	28-33 cm	34-39 cm	40-45 cm

LIKVIDACE: Po ukončení používání může být zdravotnický prostředek zlikvidován jako běžný komunální odpad.

Prohlášení: Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

ZÁRUKA: Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje jen na jakost, výrobní vady nebo nekompletnost výrobků. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a nešetrným používáním

výrobku, užíváním k jinému účelu než je uvedeno v tomto návodu k použití, zanedbáním běžné údržby výrobku, nesprávným skladováním,

konstrukčním zásahem do výrobku nebo opotřebením obvyklým používáním.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

Výrobce:

 ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel. 22 518 36 00



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

Tel.: 596 630 615



Datum vydání návodu 29.01.2024

Datum poslední revize:

REV. V 01