

Kadermin

Zdravotnický prostředek

krém

**PODPORUJE
HOJENÍ
RAN**

TECHNOLOGIE SCX

INDIKACE PRO POUŽITÍ:

Kadermin krém se doporučuje k ošetření lehkých poranění, řezných ran, lehkých popálenin, odřenin (např. škrábanců) a také vředů a proleženin.

Kadermin krém vytváří účinnou ochrannou bariéru proti mikrobiální nákaze a podporuje přirozenou regeneraci tkáně a rychlejší hojení ran.

Kyselina hyaluronová podporuje hydrataci tkáně.

Dimetikon má vysokou schopnost vytvářet ochranný film.

Díky antimikrobiálním vlastnostem patentovaného komplexu SCX (oxid křemičitý obohacený o ionty stříbra a chlorhexidin) zajišťuje obranu proti vnějším mikrobiálním patogenům.

POKyny PRO POUŽITÍ:

1. Před aplikací poraněné místo očistěte fyziologickým roztokem a vysušte.
2. Naneste takové množství krému, které pokryje celé postižené místo.
3. Po nanesení krému postižené místo nemasírujte a nechte krém volně zaschnout tak, aby se vytvořila souvislá ochranná vrstva.
4. Aplikujte jednou až dvakrát denně.

UPOZORNĚNÍ:

- Pouze pro lokální použití, nepolykejte.
- Vyhýnejte se kontaktu s očima. V případě kontaktu vypláchněte ihned vodou.
- Nepoužívejte u dětí do 3 let.
- Nepoužívejte, pokud je balení otevřené nebo poškozené.
- Nesterilizujte.
- Po použití balení pečlivě uzavřete.
- Nepoužívejte po datu použitelnosti uvedeném na obale.
- V případě výskytu neobvyklých kožních reakcí přerušte léčbu a poraďte se se svým lékařem a informujte výrobce.
- K aplikaci není nutný zdravotnický personál.

KONTRAINDIKACE:

Zjištěná přecitlivělost na jednotlivé složky krému. Nejsou známy žádné případy předávkování ani vzájemného působení s jinými léky či léčivými látkami.

Během těhotenství a kojení se doporučuje používat pod dohledem lékaře.

SLOŽENÍ:

Voda, cetylstearylethylhexanoát, izopropylmyristát, polyoxyethylen (2) ether kyseliny stearové, polyoxyethylen (21) ether kyseliny stearové, cetylstearylalkohol, glycerin, panthenol, mandlový olej, bambucké máslo, SCX (oxid křemičitý obohacený o ionty stříbra a chlorhexidinem), dimetikon, výtažek z aloe pravé, hyaluronát sodný, olivový olej, L-lysin, L-prolin, L-leucin, glycin, hydrogenovaný fosfatidylcholin, trikapryl/glycerylester kyseliny kaprinové, ethanol, skvalen, ceramid NP.

VELIKOST BALENÍ:

tuba o obsahu 50 ml

Datum revize textu: 15/10/2019



Distributor:

Valtix Pharma s.r.o.,
Dolnomlýnská 1549/1
148 00 Praha 4, Česká republika



PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.
Via Vistarino 14/F - 27010 Copiano (PV) - Itálie