



NÁVOD K POUŽITÍ **UŠNÍ SADY**

PRO SLUCHADLA WIDEX



WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA BTE

(Vyplní lékař.)

Váš typ ušní sady:


☐ TOVÁRNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE



☐ INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE




☐ TOVÁRNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4

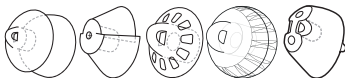

□ INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4



□ TOVÁRNÍ A INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO SLUCHADLA S KLASICKOU TENKOU HADIČKOU

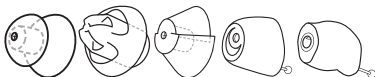

□ UŠNÍ TVAROVKY PRO SLUCHADLA S KLASICKOU HADIČKOU



OBSAH

ÚVODNÍ INFORMACE O SLUCHADLECH.....	6
Vítejte.....	6
Nasazení reproduktoru a tenké hadičky ke sluchadlu.....	6
TOVÁRNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO MODELY RIC/RITE.....	7
Čistící nástroje.....	7
Čištění.....	8
Použití ochrany před ušním mazem.....	9
Výměna ušní koncovky.....	11
Použití kotvičky.....	12
INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO MODELY RIC/ RITE.....	13
Čistící nástroje.....	14
Čištění.....	14
Použití ochrany před ušním mazem.....	15
TOVÁRNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4.....	18
Čistící nástroje.....	18
Čištění.....	19
Použití ochrany před ušním mazem.....	20
Výměna ušní koncovky.....	22

Výměna tenké hadičky.....	22
Použití kotvičky.....	25
INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO TENKOU HADIČKU 0.9 A 1.4.....	26
Čistící nástroje.....	27
Čištění.....	27
Použití ochrany před ušním mazem.....	28
TOVÁRNÍ A INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO KLASICKOU TENKOU HADIČKU.....	31
Čistící nástroje.....	31
Čištění.....	32
Výměna ušní koncovky.....	33
Výměna tenké hadičky.....	35
Použití kotvičky.....	35
KLASICKÉ UŠNÍ TVAROVKY.....	38
Čistící nástroje.....	38
Čištění.....	38
Výměna hadičky.....	40
SYMBOLY.....	41

ÚVODNÍ INFORMACE O SLUCHADLECH

Vítejte


Tento návod k použití sluchadel vás seznámí s jejich používáním. Doporučujeme, abyste si důkladně přečetli kapitolu týkající se konkrétních sluchadel, v níž se dozvíte o údržbě a výměně dílů.

POZNÁMKA

Sluchadla a jejich specifické části nemusí vypadat přesně tak, jak je znázorněno na ilustracích. Vyhrazuje si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Nasazení reproduktoru a tenké hadičky ke sluchadlu

U všech typů sluchadel musí být reproduktor a tenká hadička správně nasazeny ke sluchadlu.

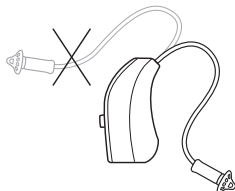

Správné nasazení


Oblouk tenké hadičky reproduktoru musí směřovat od naslouchadla.

Nesprávné nasazení

Oblouk tenké hadičky reproduktoru nesmí vést přes sluchadlo.


TOVÁRNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO MODELY RIC/RITE

V této kapitole je popsáno čištění a manipulace s různými továrními ušními koncovkami pro modely RIC/RITE. Obrázek znázorňuje sluchadlo s otevřenou ušní koncovkou, ale postup je shodný i u dalších továrních ušních koncovek.

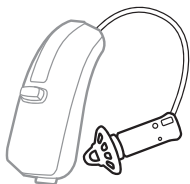

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

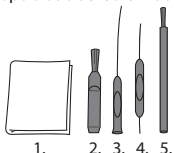


1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká a podobně. Po použití otřete sluchadlo i hadičku hadříkem.

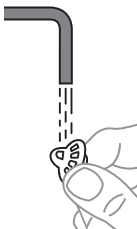

Tovární koncovku můžete omýt ve vlažné vodě poté, **co ji odpojíte od zbytku ušní sady**. Nechejte ji přes noc vyschnout.



K čištění své ušní sady nepoužívejte žádnou tekutinu ani čisticí prostředek.



Reproduktor nesmí **nikdy** přijít do kontaktu s vodou, protože by jej mohla poškodit.

Pokyny k výměně ochrany před ušním mazem naleznete v části o ochraně před ušním mazem.

Použití ochrany před ušním mazem


Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.

Pravidelně kontrolujte, že filtr není zanešen ušním mazem, a to následujícím způsobem:

Nejprve odstraňte ušní koncovku z hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil maz, vyměňte jej.




Otevřete krabičku filtrů jak je uvedeno na obrázku.

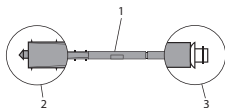


Filtr tvoří následující součásti:

1. Držák
2. Vydávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

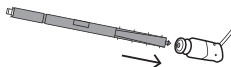


Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.

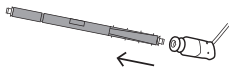

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.



Otočte držák čistým filtrem ke sluchadlu.

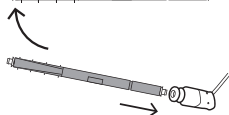

Vložte nový filtr do zvukového výstupu. Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen. Nasadte ušní koncovku zpět na hadičku.





Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.




Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazená, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

Výměna ušní koncovky

Ušní koncovku byste dle potřeby měli měnit. Potřebujete-li další doplňky ušních koncovek nebo pokud Vám již ušní koncovka do ucha nepadne, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

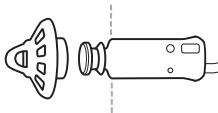

Nasadte novou ušní koncovku na reproduktor, dokud nedosáhne bodu vyznačeného tečkovanou linií.

Při nasazování reproduktoru do ušní koncovky byste měli ucítit, jak do sebe tyto dvě části zapadnou.

POZNÁMKA

Je velice důležité se ujistit, že je ušní koncovka pevně nasazená.




Nepokoušejte se odpojit hadičku od sluchadla.

Použití kotvičky

Pokud máte tovární ušní koncovku, k pohodlnému uchycení ušní koncovky v uchu můžete používat kotvičku.

Postupujte podle níže uvedeného postupu pro připojení té varianty kotvičky, kterou jste obdrželi do sady sluchátek:

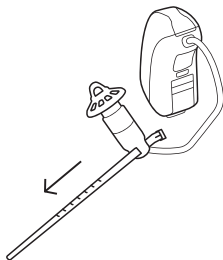


Kotvička

Protáhněte zašpičatělý konec kotvičky otvorem na boku hadičky. Kotvičku dále protahujte, dokud se nezastaví o svou úchopovou část na konci.

Ušní sada je nyní připravena k použití.

Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve vašem uchu.

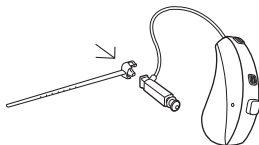


Kotvička se zámkem

Zámek kotvičky zatlačte na plochý konec reproduktor tak, aby zacvakl. Ušní sada je nyní připravena k použití.

Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve vašem uchu.

INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO MODELY RIC/RITE

V této kapitole je popsáno čištění a manipulace s různými upravenými ušními špičkami a ušními tvarovkami pro modely RIC/RITE. Není-li uvedeno jinak, je na obrázku znázorněno sluchadlo se koncovkou.

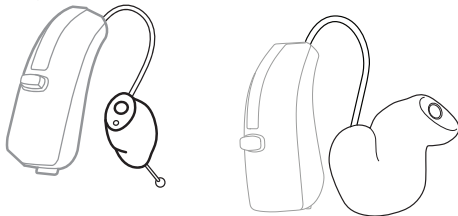


POZNÁMKA

K vyjmutí ušní koncovky z ucha vždy použijte vytahovací strunku pro vytažení.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

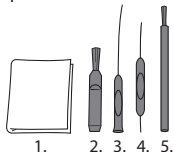

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie


Čištění



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po použití očistěte hadříkem také hadičku.

Pomocí malého kartáčku nebo hadříku odstraňte veškerý viditelný ušní maz z okolí zvukového výstupu. Pokud je zvukový výstup zanešený, vyměňte ochranu před ušním mazem - filtr.

NEPOKOUŠEJTE se ochranu před ušním mazem čistit.

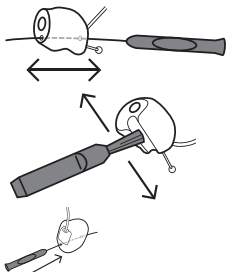

Vaše ušní koncovka / tvarovka může být vybavena ventilačním otvorem. Obrázky nalevo ukazují, jak čistit různé typy ventilačních otvorů.



Ušní sada nesmí nikdy přijít do kontaktu s tekutinami, jako je voda nebo čistící roztoky.



Nikdy se nepokoušejte odpojit hadičku od individuální ušní koncovky / tvarovky ani od sluchadla, protože by mohlo dojít k poškození hadičky.



Sluchadlo z ucha nevytahujte taháním za hadičku, ale za vytahovací strunku koncovky..


Použití ochrany před ušním mazem

Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.


Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem.



Ušní koncovku / tvarovku z hadičky NESUNDÁVEJTE.

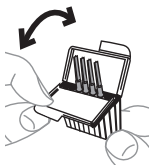


Otevřete krabičku filtrů, jak je uvedeno na obrázku.

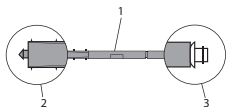


Filtr tvoří následující součásti:


1. Držák
2. Odstraňovací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

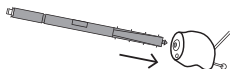


Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.

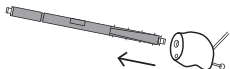

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

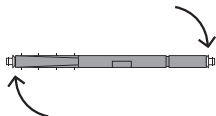

Otočte držák novým filtrem směrem ke zvukovému výstupu.

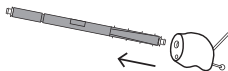

Vložte nový filtr do zvukového výstupu. Vytáhněte držák rovně ven, nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je nasazen správně.



Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.



Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem ve Vašem uchu uvolní, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.


TOVÁRNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4

V této kapitole je popsáno čištění a manipulace s továrními ušními koncovkami pro sluchadla s tenkou hadičkou 0.9 a 1.4.



Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

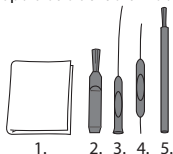


1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká a podobně. Po použití hadičku očistěte hadříkem.

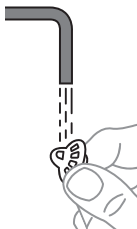

Tovární koncovku také můžete omýt ve vlažné vodě poté, **co ji odpojíte od zbytku ušní sady**. Nechejte ji přes noc vyschnout.



K čištění své ušní sady nepoužívejte žádnou tekutinu ani čisticí prostředek.


Pokyny k výměně ochrany před ušním mazem naleznete v části o ochraně před ušním mazem.

Použití ochrany před ušním mazem


Ochrana před ušním mazem- filtr pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.

Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem, a to následujícím způsobem:

Nejprve odstraňte ušní koncovku od hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil maz, vyměňte jej. **NEPOKOUŠEJTE** se ochranu před ušním mazem čistit.

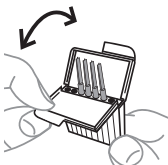


Otevřete balení filtrů, jak je uvedeno na obrázku.

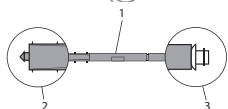


Filtr tvoří následující součásti:

1. Držák
2. Odstraňovací háček
3. Ochrana před ušním mazem-filtr

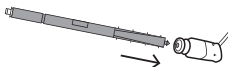

Zasuňte odstraňovací háček do použitého filtru.

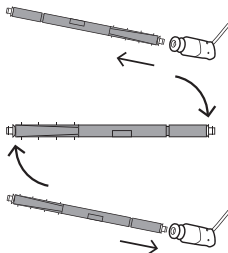

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

Otočte držák novým filtrem směrem ke zvukovému výstupu.

Vložte nový filtr do zvukového výstupu.

Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatláchte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen. Nasadte ušní koncovku zpět na hadičku.





Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.




Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

Výměna ušní koncovky

Ušní koncovku byste dle potřeby měli měnit. Potřebujete-li další doplňky ušních koncovek nebo pokud Vám již ušní koncovka v uchu nesedí, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

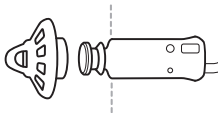

Nasadte novou ušní koncovku na tenkou hadičku, dokud nedosáhne bodu vyznačeného tečkovanou linií.

Při vkládání konce hadičky do ušní koncovky byste měli ucítit, jak do sebe tyto dvě části zapadnou.

POZNÁMKA

Je velice důležité se ujistit, že je ušní koncovka pevně nasazena.

Výměna tenké hadičky

Hadičku v případě potřeby vyměňte. Potřebujete-li další pomůcky, kontaktujte sluchadlového odborníka.

Tenkou hadičku ze sluchadla vytahujte pomocí speciálního nástroje, který jste obdrželi spolu s hadičkou.


POZNÁMKA

K dispozici jsou různé nástroje a je třeba postupovat podle níže uvedených pokynů pro speciální variantu nástroje, kterou jste obdrželi.


Široká varianta nástroje




1. Vložte hadičku do nástroje, jak ukazuje obrázek.

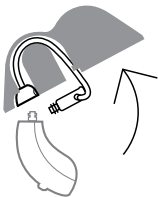

2. Zvedněte ušní sadu ze sluchadla pod úhlem znázorněným na obrázku.

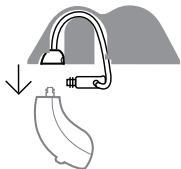

Úzká varianta nástroje

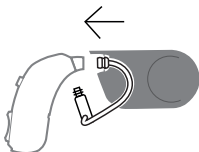

3. Poté do nástroje vložte novou hadičku a zaklapněte ji do sluchadla.

1. Vložte hadičku do nástroje, jak ukazuje obrázek.


2. Zatlačte nástroj směrem dolů pod úhlem znázorněným na obrázku.

3. Do nástroje vložte novou hadičku a zaklapněte ji do sluchadla.

Použití kotvičky

K pohodlnému uchycení ušní koncovky v uchu můžete používat kotvičku.

Postupujte podle níže uvedeného postupu pro připojení té varianty kotvičky, kterou jste obdrželi do sady sluchátek:

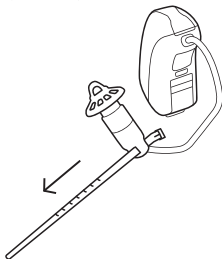


Kotvička

Protáhněte zašpičatělý konec kotvičky otvorem na boku hadičky. Kotvičku dále protahujte, dokud se nezastaví o svou úchopovou část na konci.

Ušní sada je nyní připravena k použití.

Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve vašem uchu.

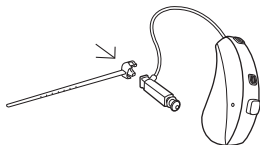


Kotvička se zámkem

Zámek kotvičky zatlačte na plochý konec reproduktor tak, aby zacvakl. Ušní sada je nyní připravena k použití.

Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve vašem uchu.

INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO TENKOU HADIČKU 0.9 A 1.4

V této kapitole je popsáno čištění a manipulace s továrními ušními koncovkami pro sluchadla s tenkou hadičkou 0.9 a 1.4.

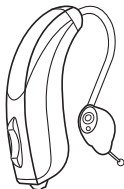


POZNÁMKA

K vyjmutí **individuální ušní koncovky** z ucha vždy používejte vytahovací strunku pro vytažení.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

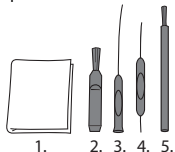


1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká a podobně. Po použití hadičku očistěte hadříkem.

Odstraňte veškerý viditelný ušní maz z okolí výstupu zvuku pomocí malého kartáčku nebo hadříku. Pokud je výstup zvuku zablokovaný, vyměňte ochranu před ušním mazem. **NEPOKOUŠEJTE** se ochranu před ušním mazem čistit.

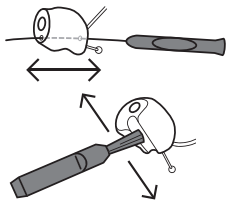

Vaše ušní koncovka může být vybavena ventilačním otvorem. Obrázky níže ukazují, jak čistit různé typy ventilačních otvorů.



Ušní sada nesmí nikdy přijít do kontaktu s tekutinami, jako je voda nebo čisticí roztoky.




Sluchadlo z ucha nevytahujte zatažením za hadičku.

Použití ochrany před ušním mazem


Ochrana před ušním mazem - filtr pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex. Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem.



Upravenou ušní koncovku z hadičky NESUNDÁVEJTE.

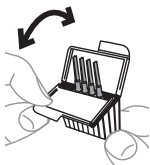


Otevřete balení filtrů, jak je uvedeno na obrázku.

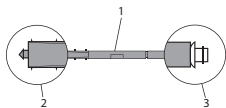


Filtry tvoří následující části:


1. Držák
2. Vyndávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

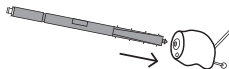


Zasuňte odstraňovací háček do použitého filtru.

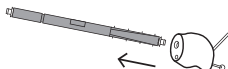

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

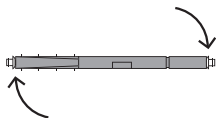

Otočte držák novým filtrem směrem ke zvukovému výstupu.

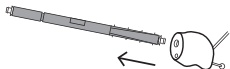

Vložte nový filtr do otvoru zvukového výstupu .

Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen.



Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.




Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.


TOVÁRNÍ A INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ KONCOVKY PRO KLASICKOU TENKOU HADIČKU

V této kapitole je popsáno čištění a manipulace s různými ušními koncovkami pro modely BTE s klasickou tenkou trubičkou.

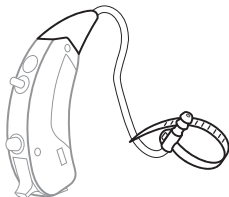


Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:

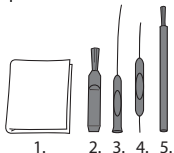

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění

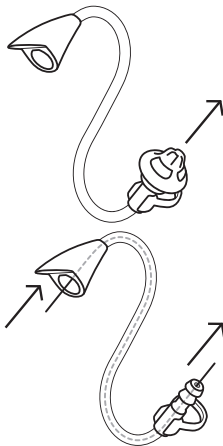

Opatrně vytáhněte ušní koncovku z hadičky. Pokud máte upravenou ušní koncovku, nemusíte ji vytahovat, abyste hadičku vyčistili.


K vyčištění hadičky použijte čisticí strunku. Protáhněte ji hadičkou. Vytáhněte strunku druhým koncem. Potřebujete-li zjistit další informace, jak získat čisticí strunku, obraťte se na sluchadlového odborníka. Tovární koncovku můžete omýt ve vlažné vodě poté, **co ji odpojíte od zbytku ušní sady**. Nechejte ji přes noc vyschnout.



Nikdy k čištění ušní koncovky nepoužívejte alkohol nebo jiné čisticí roztoky, protože by mohly způsobit změnu její barvy.

Výměna ušní koncovky

Umístění tovární ušní špičky na hadičku

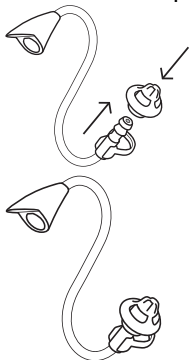


Opatrně zavádějte hadičku do ušní koncovky, dokud nedosáhne jejího konce. Je velice důležité se ujistit, že je pevně připojena.

Umístění individuální ušní špičky na hadičku

Přidržíte upravenou ušní koncovku a opatrně zatlačte hadičku na místo v ušní špičce, jak je ukázáno na obrázku. Nehtem vtlačte hadičku co nejdále.



Výměna tenké hadičky

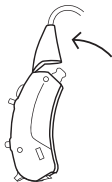

Odstraňte tenkou hadičku ze sluchadla odklopením tak, jak je znázorněno na obrázku.





Nasadte tenkou hadičku na horní stranu sluchadla, jak je zobrazeno.

Použití kotvičky

Integrovaná kotvička se u tovární dvojité koncovky nepoužívá a je potřeba ji celou odříznout.

Pokud používáte otevřenou ušní koncovku nebo koncovku tulipán, musíte kotvičku seříznout, aby vytvořila smyčku vhodné velikosti a pohodlně ukotvila ušní koncovku v uchu. Kotvičku seříznete následovně:

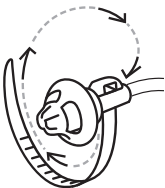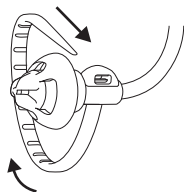


Příklad 1

Protáhněte koncovku kotvičky malým otvorem na boku hadičky.

Když má smyčka správnou velikost, přebytek odstříhnete nebo odstraňte podobným nástrojem.

Příklad 2

Utvořte na kotvičce smyčku ve směru označeném tečkovanou linií a šipkami.

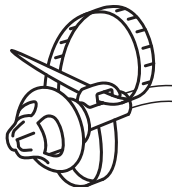

Vedte špičku kotvičky malým otvorem na boku hadičky podle obrázku a vytvořte smyčku ve tvaru srdce.



Když má smyčka správnou velikost, obraťte ušní sadu a přebytek odstříhněte nebo odstraňte podobným nástrojem.

Kotvicí smyčka má správnou velikost, když zajišťuje správnou polohu sluchadla v uchu, a když je ušní sada pevně usazena v uchu a na něm.

POZNÁMKA

Ujistěte se, že je konec kotvicí smyčky provlečen malým otvorem, a že nemá žádné ostré hrany, protože ty by mohly ucho dráždit. Koncovku prstu zkontrolujte, zda jsou hrany hladké.

POZNÁMKA


Integrovaná kotvička se **NEPOUŽÍVÁ** u individuální ušní sady a je potřeba ji celou odříznout.

KLASICKÉ UŠNÍ TVAROVKY

V této kapitole je popsáno čištění a manipulace s klasickými ušními tvarovkami pro modely BTE.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

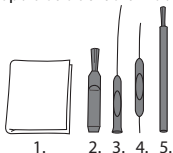


1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění



Zajistěte, aby byla vaše ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu a aby nebyla vlhká. Po použití ušní sadu otřete hadříkem.

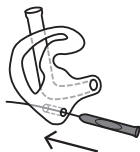


Pokud máte ventilační otvor, očistěte jej nástrojem pro odstraňování ušního mazu.



Hadičku s ušní tvarovkou pravidelně odpojíte od ušního háčku sluchadla.



Hadičku a ušní tvarovku důkladně propláchněte vlažnou vodou.
Přes noc je nechte vyschnout.

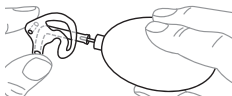

Pokud je uvnitř ušní tvarovky nebo hadičky vlhkost, před připojením hadičky k ušnímu háčku ji vysušte pomocí fénu nebo profukovacího balonku.



Nikdy k čištění ušní koncovky nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí roztoky, protože by mohly způsobit změnu její barvy.

Výměna hadičky

Pokud se hadička Vaší ušní sady zlomí, vyměňte ji.

Potřebujete-li další pomůcky k hadičce nebo pokud už Vám ušní tvarovka v uchu nesedí, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

SYMBOLY

Symbole používané WSAUD A/S při označování zdravotnických prostředků (štítky, návody k použití apod.)

Symbol	Název/Popis
--------	-------------



	Výrobce
---	----------------

	Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.
---	---



	Katalogové číslo
---	-------------------------

	Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
---	--



	Přečtěte si návod k použití
---	------------------------------------

	Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
---	---



	Varování
---	-----------------

	Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.
---	--



	Značka WEEE
---	--------------------

	„Nevyhazovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.
---	--



	Značka CE
---	------------------

	Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnicih, které se týkají označení CE.
---	---

Symbol	Název/Popis
--------	-------------



	Značka RCM
--	-------------------

	Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
--	---

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz

Widex OSTRAVA

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**WSAUD A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Dánsko

<https://global.widex.com>

Návod č.:

9 514 0561 020 02

Vydáno:

2022-04

